

# COMPATELLA® UNIVERSALSÆT, COMPATELLA® SPIKE SÆT, COMPATELLA® DUAL SPIKE SÆT

Compat Ella® ernærings sætterne er beregnet til administration af enteral sondeernæring, væske eller medicin og passer sammen med en Compat Ella® ernæringspumpen. Ernærings sætterne har en pumpekassette med den indbyggede, patenterede sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (A AFF) for at garantere patientsikkerheden.

## FUNKTIONER - KORT FORTALT

Alle Compat Ella® ernærings sæt er udstyret med ENPlus-kobling til ernæringsbeholdere, ENFit® 3-vejs medicinport samt ENFit® distal ende (til tilslutning på patientsiden).

## INDBYGGET SIKKERHED

Alle Compat Ella® ernærings sæt er udstyret med den patenterede sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (A AFF). A AFF er integreret i kassetten og aktiveres altid automatisk for at garantere patientsikkerheden.

## MERE SIKRE TILSLUTNINGER

Alle Compat Ella® ernærings sæt er udstyret med ENFit-koblinger iht. ISO 80369-3. Koblingerne er udformet, så de er inkompatible med IV-systemer for at fremme patientsikkerheden.

## FØDEVAREGODKENDT MATERIALE


Alle Compat Ella® ernærings sæt er DEHP-, BPA- og latexfri\*.

## Compat Ella® Universal Sæt

Udstyret med universalt skruelåg med luftfilter.

### KOMPATIBILITET

- Ernæringsbeholdere: ENPlus, glas- og plastbeholdere med bred hals, glasflasker med kroneprop/kapsel
- Ernæringssonder: ENFit™
- Til medicintilførsel: ENFit™

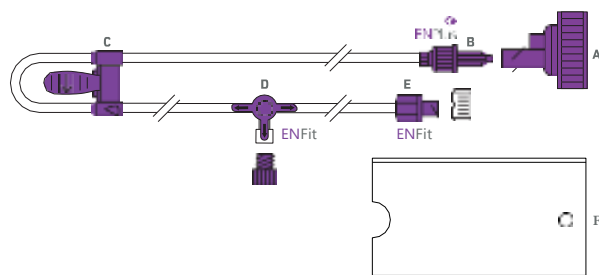


### KOMPONENTER

- A Skruelåg af universalt type med luftventil og ENPlus-port til brug med glas- og plastbeholdere med bred hals (DIN 168-1) eller glasflasker med kroneprop/kapsel (EN 14634 og EN 14635)
- B ENPlus 'kun enteral' proksimal ende (ernæringskobling) med drejbar lås
- C Compat Ella® pumpekassette med den indbyggede, patenterede sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (A AFF)
- D 3-vejs medicinport med ENFit™-kobling og hætte
- E ENFit™ distal ende (sondeforbindelsen på patientsiden)
- F Holdertil 500 ml-flaske, LDPE (Low Density Polyeten)

## Compat Ella® Spike Sæt

### KOMPATIBILITET

- Ernæringsbeholdere: ENPlus
- Ernæringssonder: ENFit™
- Til medicintilførsel: ENFit™

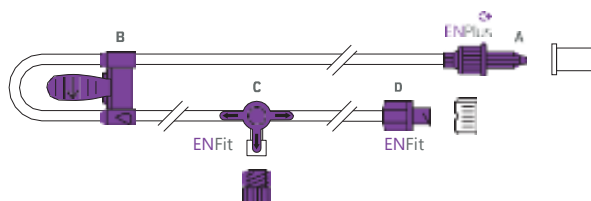

### KOMPONENTER

- A ENPlus 'kun enteral' proksimal ende (ernæringskobling) med drejbar lås og hætte
- B Compat Ella® pumpekassette med integreret, patenteret sikkerhedsfunktion Auto-Anti-Free-Flow (A AFF)
- C 3-vejs medicinport med ENFit™-kobling og hætte
- D ENFit™ distal ende (sondeforbindelsen på patientsiden)


For sundhedsfagligt personale

## Compat Ella® Dual Spike Sæt

Beregnet til samtidig administration af enteral ernæring og/eller hydrering via to separate beholdere.

### KOMPATIBILITET

- Ernæringsbeholdere: ENPlus
- Ernæringssonder: ENFit™
- Til medicintilførsel: ENFit™

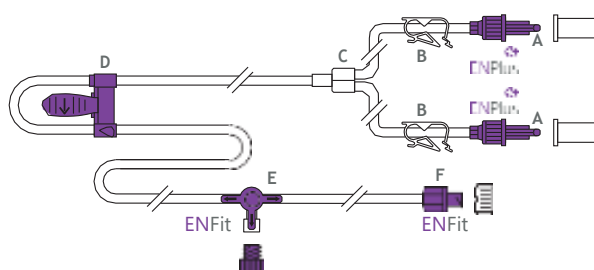

### KOMPONENTER

- A ENPlus 'kun enteral' proksimal ende (ernæringskobling) med drejbar lås og hætte
- B Klemme til at lukke manuelt for væskestrømmen
- C Y-ventil
- D Compat Ella® pumpekassette med den integrerede, patenterede sikkerhedsfunktion AAFF (Auto-Anti-Free-Flow)
- E 3-vejs medicinport med ENFit™-kobling og hætte
- F ENFit™ distal ende (sondeforbindelsen på patientsiden)

### SPECIFIKATIONER

**Sterile:** Steriliserede med etylenoxid.

**Emballage:** Individuelt emballeret i æsker med 30 stk.

Compat Ella® Universal Sæt (39,5 x 29,5 x 14 cm).

Compat Ella® Spike Sæt (29,5 x 26 x 19 cm).

Compat Ella® Dual Spike Sæt (29,5 x 26 x 19 cm).

**Opbevaring:** Opbevares ved stuetemperatur. Beskyttes mod direkte sollys og fugt.

**Holdbarhed:** 3 år fra produktionsdato. Udløbsdatoen står på emballagen.

**Anvendelsestid:** 24 timer. Engangsbrug.

**Slangens længde:** Afstanden fra ernæringskoblingen til sondekoblingen på patientsiden: 230 cm.

**Afstand fra ernæringskoblingen til pumpen, alle sæt:** 50 cm.

**Afstand fra ernæringskoblingen til Y-ventilen Compat Ella® Dual Spike Sæt:** 30 cm.

**Sondediameter:** Nominel inderdiameter: 3,0 mm. Nominel yderdiameter: 4,15 mm.

**CE-mærkning:** Følger EU-direktivet om medicintechniske produkter 93/42/EEG. CE-certificering er udfærdiget af akkrediteret anmeldt organ: TÜV SÜD (CE0123).

**Miljøaftryk:** "Grüne Punkt"-symbolet viser, at Nestlé Health Science påtager sig sit producentansvar og bidrager til finansieringen af genindvindingen.

**Materiale:** Sonde: PVC og silikone. Alle materialer er DEHP-, BPA- og latexfri\*. Yderligere information kan fås på anmodning.

### BESTILLING

Nestlé Health Science kan købes hos Danucare (tlf. 71994710 – Fax 70305165 – info@danucare.dk)

PRODUKT	VARENR.	ANTAL PR. KASSE
Compat Ella® Universal Sæt	21 87 39	30 stk.
Compat Ella® Spike Sæt	21 87 40	30 stk.
Compat Ella® Dual Spike Sæt	21 87 41	30 stk.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte din repræsentant for Nestlé Health Science eller gå ind på [www.compatella.com](http://www.compatella.com)

\*Delenes indhold overskrider ikke de maksimale koncentrationer på 0,1% total DEHP (DI-(2-ethyl-hexyl)phthalat). Der er ikke bevidst brugt latex eller BPA under fremstillingsprocessen.

© Registreret varemærke som ejes af Société des Produits Nestlé SA.

Mere information om ENFit® kan fås på [www.stayconnected.org](http://www.stayconnected.org).



**DanuCare**  
FOR SIKKERHED OG TRYGHED

Københavnsvej 11B, 4800 Nykøbing F, CVR. 39998882

Tlf. 7199 4710, Fax. 7030 5165, [info@danucare.dk](mailto:info@danucare.dk), [www.danucare.dk](http://www.danucare.dk)