



RENGØRING AF FLERGANGSSPRØJTER

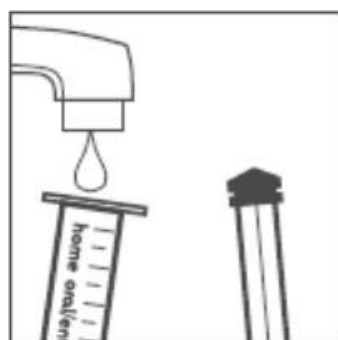

- Sprøjten rengøres straks efter brug.
- Kom sprøjten i varmt sæbevand.
- Sprøjten rengøres indvendigt ved at trække stemplet ind og ud indtil alle spor af ernæring eller medicin er væk.
- Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt i varmt sæbevand .
- Skyl sprøjte og stempel i rindende vand. Ryst overflødigt vand af.
- Tør med ren køkkenrulle (brug ikke viskestykke/klud).
- Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares i en ren og tør beholder med låget påsat.
- Sprøjten må ikke rengøres i opvaskemaskine, da det forkorter levetiden.
- Hvis stemplet går trægere, markeringerne bliver uklare eller sprøjten bliver beskadiget, bør sprøjten kasseres og erstattes med en ny sprøjte inden de 7 dage/35 gange.

UDSKIFTES EFTER 7 DAGE / 35 X INDGIVELSE

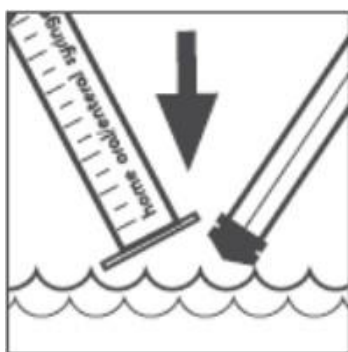